

1. 我的安卓手机和血压计蓝牙配对已经成功了，在血压计“更多”里面也显示血压计和手机连接在一起了。但是为什么还是不能用手机控制血压计进行测量？怎么办？

这是因为血压监测仪和手机蓝牙没有连接成功。这可能是信号干扰，或者之前血压监测仪和手机蓝牙连接没有完全断开造成的。建议关闭手机和血压监测仪，然后重新打开手机和血压监测仪，尝试连接。
2. 我的血压计没有反应，好像死机了，怎么办？

用 USB 电缆连接血压监测仪和充电电源，然后按住按钮，直到血压计复位，回复反映。
3. 我正在测量血压，看到快没有电了，就用 USB 电缆连接监测仪和电源，结果测量中断了。

这是因为处于安全考虑，血压计充电时，本血压不能进行任何测量工作。所以系统自动复位，停止工作。充满电后，就可以继续测量了。
4. 我左臂不舒服，向佩戴在右臂上，发现袖带褶皱，而且血压监测仪位于上臂内侧，很不方便。

因为左臂距离心脏最近，是观测中心血压的理想位置。所以本血压监测仪袖带时针对左臂设计的，可以偶尔戴在右臂上测量观测，但是建议尽量使用左臂观测。
5. 我编程之后，放下血压监测仪，忘在一边。后来发现血压监测仪关机了。为什么？怎么办？

为了节省电池，血压监测仪空转测量三次后，会自动进入休眠模式。如果想恢复编程测量，用户只需佩戴上监测仪，然后请按以下监测仪的按钮，观测到电源指示灯绿灯常亮，就可以了。
6. 为什么血压监测仪有时候在测量过程中会再次加压？

星脉血压监测仪采用只能升压的方法，本次升压数值是上次收缩压测量值加上38mmHg。如果测量这换人或者被测者血压升高，则血压监测仪会自动发现需要再次升压以进行本次测量。
7. 由于长期使用，我的袖带脏了，怎么办？

一手拿着血压监测仪，一手拿着袖带。然后从偏向血压监测仪按钮一端稍微用力，可以慢慢将监测仪从袖带上取下。然后您可以从袖带边缘的开口处把袖带里面的气囊，包括固定背板，取出。然后清洗袖带外套。清洗完成后，把气囊和背板重新装回袖带，把背板的五个卡勾从袖带上的五个孔位穿出，然后重新把背板五个卡位装到血压监测仪背部。